

«Теплый аппликатор для глаз Дельфанта®»

Инструкция по применению

Что такое «Теплый аппликатор для глаз Дельфанта®»?

«Теплый аппликатор для глаз Дельфанта®» – это многоразовое изделие, которое служит для быстрого получения тепла в любое время и в любом месте: дома, на работе или на отдыхе. Он моментально нагревается до +52 °С и долго держит тепло.

В основу работы «Теплого аппликатора для глаз Дельфанта®» положен эффект выделения тепла при кристаллизации солей из пересыщенного раствора.

Такой солевой аппликатор можно использовать не только для нагрева, но и для охлаждения.

Показания к применению:

«Теплый аппликатор для глаз Дельфанта®» используется для активизации капиллярного кровоснабжения век и улучшения работы глазного аппарата и восстановления функции органа зрения при:

1. зрительном переутомлении;
2. блефаритах;
3. синдроме «сухого глаза».


Перед применением в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Противопоказания:

Онкологические заболевания, инфекционные процессы в области глаз, кровотечения и травмы.

Способ применения «Теплого аппликатора для глаз Дельфанта®»


Шаг 1 - Запуск

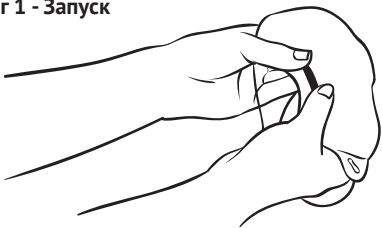

Взять в руки «Теплый аппликатор для глаз Дельфанта®», нащупать внутри него палочку-пускатель и согнуть ее под углом (5-10°), приложив небольшое усилие. Аппликатор представляет собой герметичную ёмкость с пересыщенным солевым раствором, как правило, ацетата натрия. Раствор находится

в состоянии равновесия. Внутри раствора плавает палочка – «пускатель» или триггер. При перегибании палочки-пускателя (триггера) раствор выходит из состояния равновесия, согнутый триггер становится центром кристаллизации, вызывая фазовый переход раствора из жидкого состояния в твердое. Переход сопровождается выделением тепла, и аппликатор разогревается до температуры 47 – 52 °С. Время полезной работы «Теплого аппликатора для глаз Дельфанта®» составляет 20-30 минут. После запуска аппликатор необходимо размять в руках, чтобы он стал более мягким и легко принимал форму согреваемой поверхности.

Шаг 2 - Аппликация

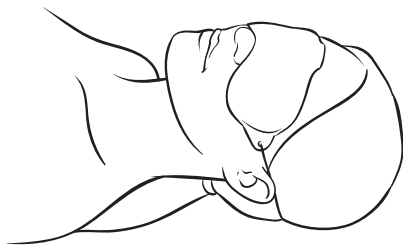

Примите удобное положение и приложите «Теплый аппликатор для глаз Дельфанта®» к закрытым глазам на 20-30 минут. Для большего комфорта закрепите аппликатор специальной фиксирующей резинкой (находится в комплекте).

Шаг 3 - Восстановление



• Поместите использованный «Теплый аппликатор для глаз Дельфанта®» в специальный мешочек (находится в комплекте)



и

• положите на 15-20 минут в кипящую воду. Восстановление аппликатора является обратным процессом: растворение кристаллов соли происходит с поглощением тепла, после чего вещество переходит в жидкое состояние и аппликатор вновь готов к использованию.

ВНИМАНИЕ!

Если купленный Вами аппликатор не запустился с первого раза – это не означает, что он не работает. В данном случае, перед первым применением его необходимо прокипятить!

Применение солевого аппликатора в качестве холодного компресса

Шаг 1

Поместите незапущенный аппликатор в холодильник (**НЕ в морозильную камеру!**) на 30-40 минут. За это время он охладится до +4С - +6С.

Такой аппликатор в 3 раза дольше сохраняет холод, чем лед.

Шаг 2

Примите удобное положение и приложите аппликатор к закрытым глазам на 10-15 минут.

ВАЖНО!

- Не помещайте аппликатор в микроволновую печь.
- Не помещайте горячий аппликатор в холодильник – это может привести к поломке холодильника.
- Не помещайте аппликатор в холодильник в твердом (запущенном состоянии), т.к. в дальнейшем его будет неудобно использовать в качестве компресса.
- Не помещайте аппликатор в морозильную камеру холодильника, т.к. при -8С раствор внутри изделия самокристаллизуется.

Правила использования

1. Хранить при комнатной температуре. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. При кипячении аппликатора всегда используйте специальный мешочек (находится в комплекте) или полотенце.
3. Извлекая аппликатор из кипящей воды, избегайте острых предметов, которые могут привести к нарушению его герметичности. При проколе раствор самокристаллизуется, и изделие выходит из строя.

4. Если после использования аппликатор находится в твердом состоянии, не пытайтесь его сложить, чтобы поместить в кастрюлю. Это может привести к разрыву пакета. Подберите посуду для кипячения по размеру аппликатора.

5. При охлаждении изделия до - 8 С° раствор самокристаллизуется. Для восстановления его необходимо сначала согреть до комнатной температуры, а затем прокипятить.

6. Если приобретенный Вами аппликатор находится в твердом состоянии, это означает, что раствор самокристаллизовался из-за случайного сильного удара или низкой температуры во время транспортировки. Это естественное явление - если оно произошло, то перед первым применением просто прокипятите аппликатор.

7. Температура нагрева аппликатора 47-52 °С. Для прогревания зоны глаз людям с чувствительной кожей и детям до 3-х лет, аппликатор рекомендуется обернуть тканевой салфеткой.

8. В процессе эксплуатации в растворе могут появиться кристаллы в виде снежинок. Наличие кристаллов не влияет на нормальную работу аппликатора и не является браком.

9. При случайной разгерметизации аппликатора и в случае попадания раствора на слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости промойте их теплой водой.

10. Перед применением аппликатора в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Произведено по заказу ООО «Дельфанта»: Россия, 111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, дом 9а, с 4, офис 16
Тел. +7(495) 185-57-41

Изделие медицинского назначения.

Гарантийный срок - 2 года со дня продажи.

Срок годности не ограничен.

Изготовлен из экологически чистых материалов.

Изготовлен по ТУ № 9398-001-40239490-2007. Изделие запатентовано. Патент № 2149608

Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РУ ФСР № 2007/00829 от 11.03.2011

Производитель: ООО «ДЕЛЬТА-ТЕРМ», 125057, Россия, Москва, ул. Новопесчаная д. 6, к. 2